

ЛухаВіте (ЛюксаБайт) матеріал для реєстрації прикусу

Опис матеріалу

ЛухаВіте — це матеріал автоматичного змішування на основі біс-акрілату для реєстрації прикусу. Він чинить ледве помітний опір змиканню щелеп пацієнта. Тому надійна реєстрація оклюзії гарантована. Детальний відбиток рельєфу оклюзії та висока кінцева твердість полегшують точне розміщення робочої моделі та моделі-антагоніста.

Показання

Реєстрація прикусу


Основні запобіжні заходи

- Застосовується тільки у галузі стоматології!
- Зберігайте у недоступному для дітей місці!
- Не допускайте потрапляння на шкіру! У разі випадкового потрапляння на шкіру одразу ретельно промийте уражену ділянку водою з милом.
- Не допускайте потрапляння в очі! У разі випадкового потрапляння в очі одразу ретельно промийте їх великою кількістю води і, якщо потрібно, зверніться до лікаря.
- Не застосовуйте ЛухаВіте, якщо є підвищена чутливість до акрилатів.
- Не наносіть ЛухаВіте безпосередньо на слизову оболонку тих ділянок ротової порожнини, на яких відсутні зуби, оскільки може виділятися тепло.

Взаємодія

- Не допускайте контакту з ретракційними розчинами, оскільки у деяких випадках через залишки ретракційних розчинів процес твердіння може зайняти більше часу. Перед реєстрацією прикусу ретельно змийте залишки ретракційних розчинів водою.

Застосування картриджа Automix

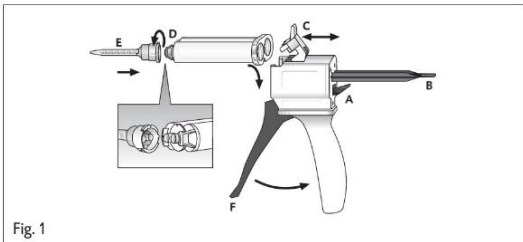

Установка картриджа

1. Перемістіть важіль [мал. 1, А] на тильній частині диспенсера Automix-Dispenser угору і повністю відтягніть засувку [мал. 1, В].
2. Підніміть пластмасовий фіксатор [мал. 1, С], вставте картридж і закріпіть його пластмасовим фіксатором [мал. 1, С].

Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на картриджі збігаються з виїмками на диспенсері Automix-Dispenser.

Установка змішувальної канюлі

1. Зніміть ковпачок картриджа [мал. 1, D] або використану змішувальну канюлю, повернувши його/її на 90° проти годинникової стрілки, і викиньте.
2. Встановіть нову змішувальну канюлю [мал. 1, E].

Примітка. Для забезпечення оптимального результату змішування DMG рекомендує використовувати змішувальні канюлі, які можна придбати у DMG. В продажу також є додаткові набори всіх змішувальних канюль.

Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на змішувальній канюлі збігаються з виїмками на картриджі.

3. Зафіксуйте змішувальну канюлю, повернувши її на 90° за годинниковою стрілкою.

Нанесення матеріалу

- Якщо ви вперше використовуєте картридж, видавіть кількість матеріалу розміром із горошину та викиньте її.
- Натисніть на курок [мал. 1, F] диспенсера Automix-Dispenser, щоб матеріал змішався у змішувальній канюлі, та одразу після цього наносіть його.

Примітка. Після нанесення матеріалу залиште використану змішувальну канюлю на картриджі замість ковпачка для захисту невикористаного матеріалу!

Дістаньте картридж

1. Перемістіть важіль [мал. 1, А] на тильній частині диспенсера Automix-Dispenser угору і повністю відтягніть засувку [мал. 1, В].
2. Підніміть пластмасовий фіксатор [мал. 1, С] і дістаньте картридж.

Вказівки щодо застосування

- Для реєстрації прикусу цілих зубних дуг використовуйте матеріал ЛухаВіте сегментами (3-4 см).
- Відповідні часові інтервали вказано у розділі «Технічні дані».

Рекомендований спосіб застосування

Реєстрація звичного прикусу

1. Трохи ізолюйте усі наявні акрилові конструкції вазеліном або схожим розділовим засобом. Заблокуйте усі наявні проміжні коронки мостоподібних протезів такою речовиною, яка для цього підходить, наприклад, воском.
2. Нанесіть ЛухаВіте на сухий зубний ряд. Під час виконання цієї процедури довжина смужки матеріалу може дорівнювати 3-4 см. Перш за все слід покрити відпрепаровані ділянки.
3. Дайте пацієнтові нагоду зімкнути зуби у бажаному прикусі.
4. Щоб гарантувати повну реєстрацію оклюзійних поверхонь, нанесіть додаткову кількість матеріалу під щічні бугри зубів верхньої щелепи.
5. Після твердіння матеріалу протягом 45-60 с попросіть пацієнта трохи розімкнути, а потім знову зімкнути зуби. Завдяки цьому потім буде легше дістати реєстратор.
6. Після твердіння матеріалу протягом наступних 90 с витягніть матеріал пальцями у рукавичках або за допомогою інструмента, який для цього підходить.
7. Щоб уникнути помилок позиціонування зменште реєстратор до розмірів оклюзійних контактних поверхонь. Скористайтеся інструментом, який для цього підходить, наприклад, бором для акрилу.
8. Зімкніть моделі за допомогою реєстратора прикусу.

Реєстрація центрального співвідношення за допомогою фронтального закусочного шаблону

1. Для вертикального роз'єднання використовуйте відповідний матеріал, наприклад, композит або силікон. Під час виконання цієї процедури розмістіть матеріал у фронтальній зоні нижньої щелепи і попросіть пацієнта зімкнути зуби у бажаній оклюзії. Зубні ряди повинні бути неповністю зімкнутими, щоб залишилося місце для нанесення матеріалу для реєстрації прикусу.
2. Далі виконайте такі ж самі дії, як під час реєстрації звичного прикусу, — за пунктами 2-8.

Дезінфекція реєстрата прикусу

Реєстрат прикусу можна дезінфікувати стандартними дезінфекційними розчинами. Рекомендується використовувати засоби, які містять спирт, оскільки вони також видаляють інгібований киснем шар.

Зберігання реєстрата прикусу

- Захищайте від впливу прямих сонячних променів.
- Зберігайте в сухому місці за кімнатної температури (15-25 °C/59-77 °F).

Термін зберігання реєстрата прикусу необмежений.

Технічні дані

Загальний робочий час	0:45 хв. від початку замішування
Еластична фаза	2:00-2:30 хв. від початку замішування
Остаточне твердіння	4:00 хв. з моменту вилучення
Твердість за Барколем	25 за 1 годину

Дезінфекція диспенсера Automix-Dispenser

Після дезінфекції диспенсер Automix-Dispenser можна використовувати повторно, але, якщо на ньому є помітні сліди зносу, його слід замінити.

Дезінфекцію можна проводити дезінфекційними засобами для обробки зануренням, які представлені на ринку. DMG рекомендує використовувати тільки ті дезінфекційні розчини, які є у списку Інституту ім. Роберта Коха. Диспенсер Automix-Dispenser можна також стерилізувати в автоклаві.

Умови зберігання і термін придатності

- Зберігайте в сухому місці за кімнатної температури (15-25 °C/59-77 °F).
- Не зберігайте в холодильних або морозильних камерах.
- Захищайте від впливу прямих сонячних променів.
- Після нанесення матеріалу залиште використану канюлю на картриджі як ковпачок – для захисту невикористаного матеріалу.
- Не застосовуйте після закінчення терміну придатності.

Склад

Скляний наповнювач у матриці з багатофункціональних метакрилатів. Не містить метилметакрилату й пероксидів.

Форми випуску

1 картридж з 50 мл пасти, 15 канюль Automix-Tip	REF 110560
5 картриджів по 50 мл пасти, 75 канюль Automix-Tip	REF 110558

Дата перегляду інструкції: 07/2020



ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмбХ

Елбгауштрассе 248, 22547 Гамбург, Німеччина
тел. +49(0)40 84 006-0, www.dmg-dental.com



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"

вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
e-mail: info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ «КРИСТАЛ ФАРМА»

вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
e-mail: info@crystal.ua
www.crystal-dental.com.ua